



cleo⁹⁰

infusionsset


- Enkel
- Hudvänlig
- Säker

Applicering och anslutning

Tvätta bort fett och smuts med spritsudd. Torka torrt.

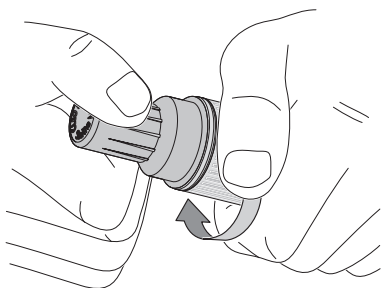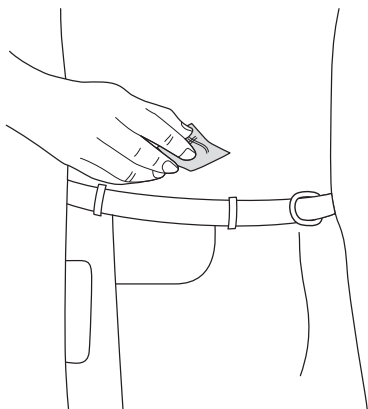


Vrid av locket.

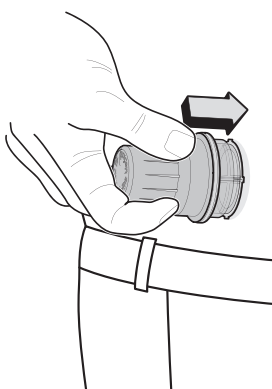


**"Klick".
Håll kvar ca
5 sekunder.**



**Släpp trycket
och vik
försiktigt åt
sidan.**

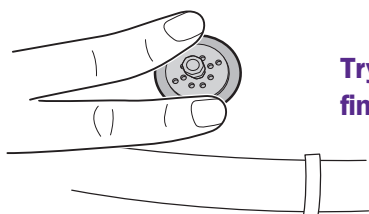


**Tryck med
fingret på häftan.**

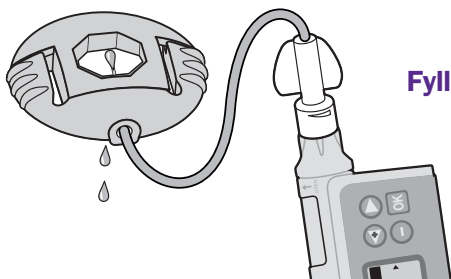

Fyll slangen.


Pressa samman de räfflade sidorna...

...och dra isär tills det tar stopp.

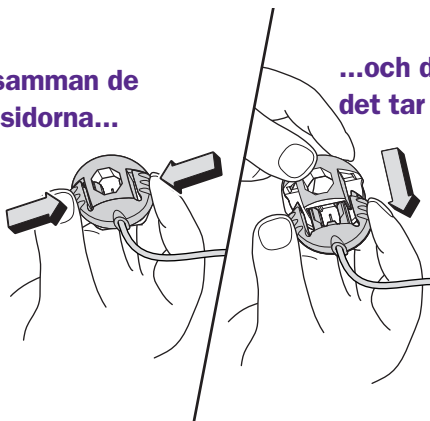

Trä på kopplingen på kanylen...

...och tryck ihop.

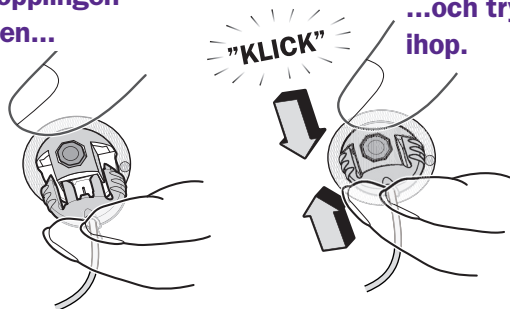

Fäst slangen åt det håll som passar dig. Fyll kanylen.

**Fyll 6 mm kanylen med 0,2 E.
Fyll 9 mm kanylen med 0,3 E.**

Varunummer

204969	Cleo 90, 6 mm mjuk vinkelrät kanyl, 60 cm slang	10 st
204970	Cleo 90, 6 mm mjuk vinkelrät kanyl, 80 cm slang	10 st
204971	Cleo 90, 6 mm mjuk vinkelrät kanyl, 110 cm slang	10 st
204972	Cleo 90, 9 mm mjuk vinkelrät kanyl, 60 cm slang	10 st
204973	Cleo 90, 9 mm mjuk vinkelrät kanyl, 80 cm slang	10 st

TIPS! När du vill avlägsna häftan, börja dra vid den vita prick.

